

## Katheterspitzen

### Entnahmetechnik

- Beim Ziehen des Katheters Kontamination vermeiden (bei intravasalen Kathetern Eintrittsstelle vorher desinfizieren).
- Katheter ca. 2-3 cm oberhalb der Spitze mit einer sterilen Schere abschneiden.
- Die Spitze in ein steriles Schraubdeckelröhrchen ohne Transportmedium überführen.

### Volumen/Probenzahl

entfällt

### Lagerung und Transport

In bruch sicherem **Transportgefäß** so schnell wie möglich ins Labor bringen.

Transportzeit: ≤ 24 h

Lagerung: Raumtemperatur